



Q-interactive®

Kapittel 1

Gjør dine iPader klare for Q-interactive

Q-interactive Brukerhåndbok
Januar 2023

Slik konfigurerer du iPad-innstillinger for Q-interactive

For å gjennomføre en test på Q-interactive trenger du **to iPader**. Den ene brukes av testlederen til å administrere og skåre testoppgaver. Den andre brukes av testpersonen til å motta stimuli og svare på oppgaver. Testen administreres ved hjelp av en iPad-applikasjon som heter **Assess** som må installeres på begge enhetene.

Før du kan begynne å bruke og administrere tester på Q-interactive, må du først gjøre følgende:

- **Konfigurere innstillinger** på begge iPadene så de:
 - a) Kan kobles sammen for å kunne dele stimuli og data på korrekt måte.
 - b) Viser stimuli på den standardiserte måten.
 - c) Eliminerer distraksjoner som kan forstyrre testsituasjonen.
- Installere **Assess-appen** fra **Apple App Store**.
- **Konfigurere Assess-appen** på begge iPadene slik at de kan kommunisere med hverandre og fungere riktig under testadministreringen.

Følgende funksjoner i iPad- og Assess-innstillinger beskrives i dette kapitlet:





Innstillinger for iPadene:





- Justering av lysstyrken
- Aktivering av Wi-Fi
- Aktivering av Bluetooth
- Deaktivering av bevegelser
- Språk og områdeformat
- Innstilling for Ikke forstyrr

Assess på begge iPadene:

- Installering av Assess-appen for Q-interactive
- Tilgang til Bluetooth i Assess
- Tilgang til Lokalt nettverk i Assess
- Tilgang til Mikrofon i Assess
- Konfigurering av programmodus til Testleder og Testperson
- Aktivering av lydinnspilling i Assess

Hvis du er godt kjent med hvordan man bruker en iPad, kan du raskt konfigurere begge iPadene ved hjelp av en sjekkliste i tabellene under og på neste side. Hvis du ikke er fortrolig med det, kan du gjerne følge instruksjoner i de kommende avsnittene.

iPad		Konfigurering av iPadene		
Testleder	Testperson	Funksjon	Innstilling	Alternativ
X	X	Skjerm og lysstyrke	Utseende	Lyst
	X	Skjerm og lysstyrke	Automatisk	
	X	Skjerm og lysstyrke	Skyv feltet ut til høyre	Maksimum
X	X	Skjerm og lysstyrke	Autolås	15 minutter
X	X	Wi-Fi	På	Velg nettverk
X	X	Bluetooth	På	
X	X	Generelt	Bevegelser	
X	X	Generelt	Språk og område	Norsk – Norge
X	X	Fokus	Ikke forstyrr	

iPad		Konfigurering av Assess- appen		
Testleder	Testperson	Funksjon	Innstilling	Alternativ
X	X	Assess	Tilgang til Bluetooth	
X	X	Assess	Tilgang til Lokalt nettverk	
X		Assess	Programmodus	Testleder
	X	Assess	Programmodus	Testperson
X	X	Assess	Mikrofon	
X	X	Assess	Aktiver lydinnspilling	

Bli kjent med din iPad – og øv!

Hvis du ikke er vant med å bruke en iPad, bør du sette av tid til å gjøre deg kjent med enheten. Gå til https://support.apple.com/no_NO/manuals/ipad og les brukerhåndboken som gjelder for din iPad-modell og det operativsystemet iPadOS som finnes på den.

Obs! Sørg for at den samme versjonen av iPadOS er installert på begge iPadene og at denne versjonen helst er den aller nyeste.

Før du bruker iPaden til å administrere en test på Q-interactive, er det viktig å øve først. Vi anbefaler deg også å sette deg inn i *Kapittel 4. Bli kjent med Assess-appen på Q-interactive*. Du finner dette kapitlet i Q-interactive Brukerhåndbok under Support-fanen etter pålogging til Q-interactive Central.

Obs! Beskrivelsene som finnes videre i dette kapitlet (inkludert skjermbilder) baserer seg på iPadOS 15 og en 10.2" iPad (9. generasjon).

Du kan konfigurere alle iPad-innstillingene via ikonet **Innstillinger** på **Hjem-skjermen**."



Justering av lysstyrken

Du trenger å justere lysstyrken for å forsikre deg om at både tekst og stimuli vises korrekt.


Gå til **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke**.

Trinn 1: Sett utseende av iPaden til **Lyst** på begge iPadene.

Trinn 2: Slå av **Automatisk** justering av lysstyrken (dette gjelder først og fremst iPaden som skal brukes av testpersonen).

Trinn 3: Angi **maksimal lysstyrke** ved å dra fingeren over mot høyre til hele streken er blå (dette gjelder først og fremst iPaden som skal brukes av testpersonen).

Trinn 4: Still inn **Autolås** på 15 minutter på begge iPadene.

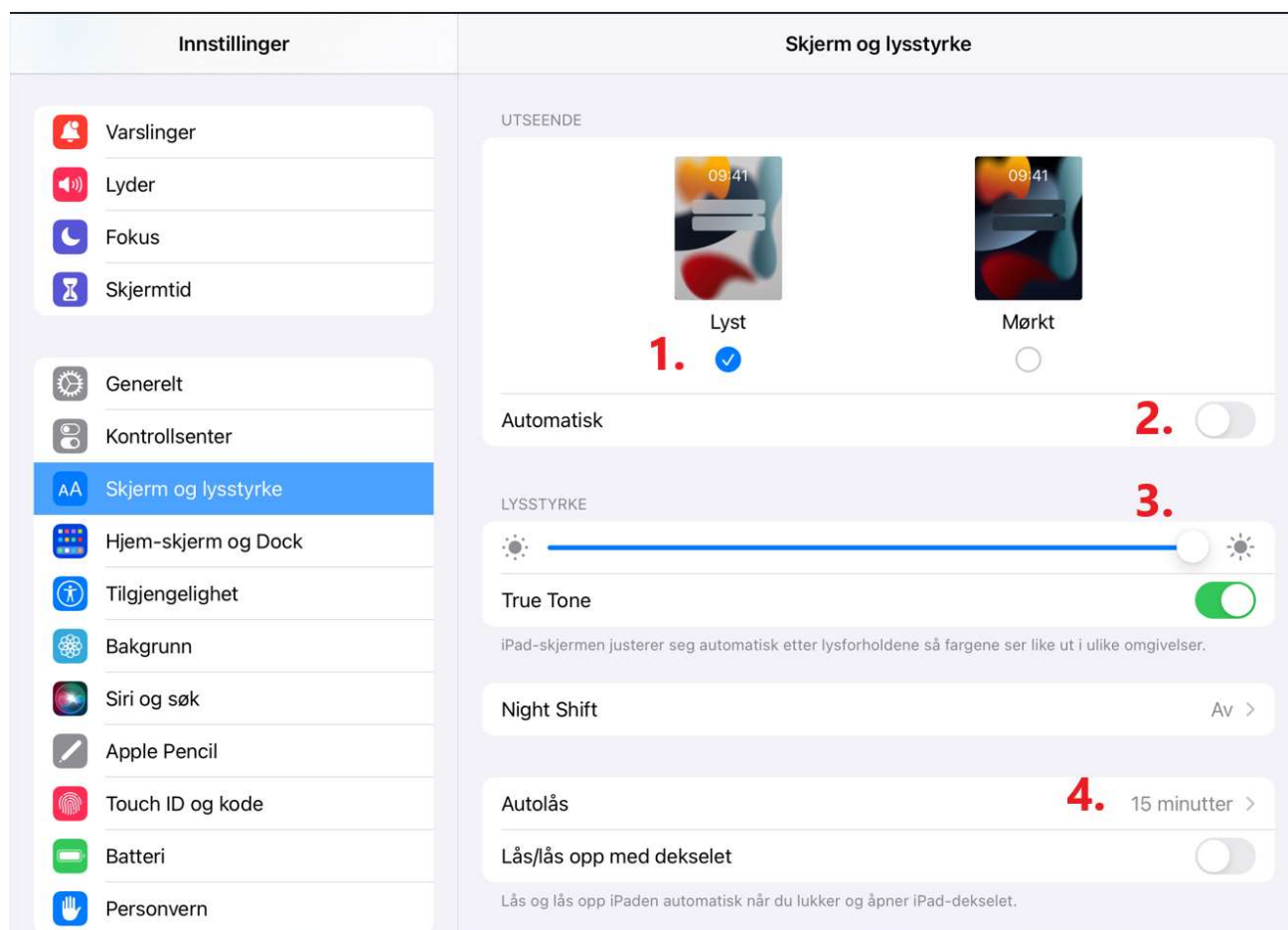


Aktivering av Wi-Fi

Du trenger å aktivere Wi-Fi på begge iPadene.

Obs! Wi-Fi må aktiveres på begge iPadene for at det blir mulig å koble dem sammen og administrere en test på den korrekte måten. Vi anbefaler også å koble begge iPadene til et bestemt nettverk til tross for at nettverkstilkobling *ikke* er nødvendig under selve testadministreringen (bare at Wi-Fi er aktivert). Tilkobling til et bestemt nettverk er imidlertid påkrevd ved synkronisering av Assess før og etter testadministrering. Hvis begge iPadene kobles til et nettverk under testadministreringen, er det viktig at det samme nettverket er valgt på begge enhetene.

Trinn 1: Gå til **Innstillinger > Wi-Fi**.

Trinn 2: Slå på Wi-Fi. Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Velg det nettverket du vil koble deg til. Etter at du har koblet deg på, vil du se ✓ ved siden av det valgte nettverket og 📶 øverst til venstre på skjermen.

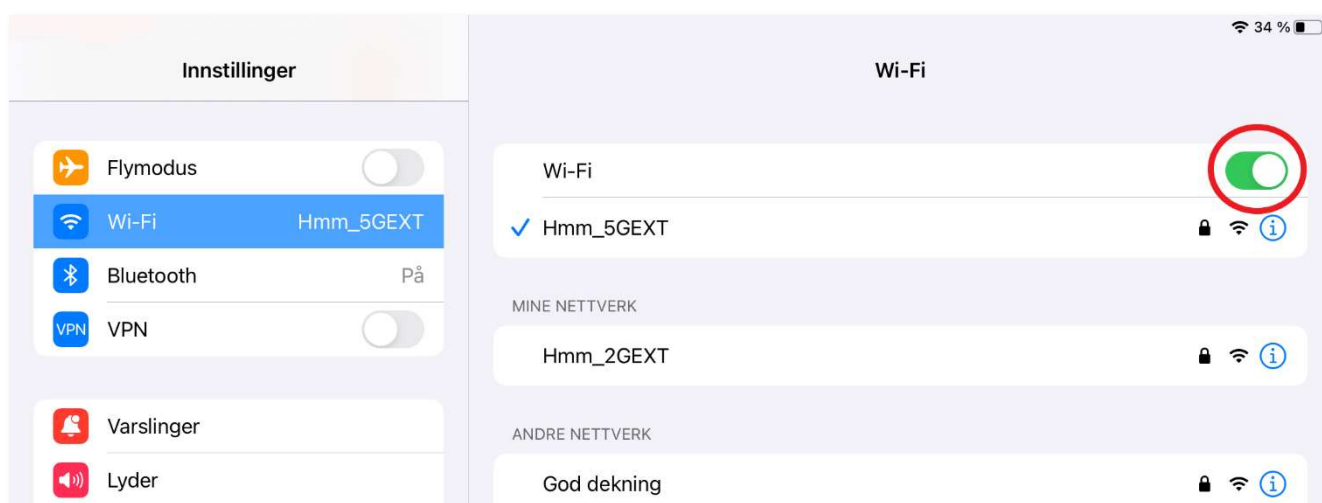

Aktivering av Bluetooth

iPadene kommuniserer ved hjelp av Bluetooth og Wi-Fi. Stimulusmateriale sendes fra testlederens iPad til testpersonens iPad og testpersonens svar sendes tilbake til testlederens iPad.

Trinn 1: Gå til **Innstillinger > Bluetooth**.

Trinn 2: Slå på Bluetooth.




Deaktivering av Bevegelser

Du bør slå av bevegelser på begge iPadene for å eliminere faktorer som kan forstyrre testsituasjonen.

Trinn 1: Gå til **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser**.

Trinn 2: Slå av **Fleroppgavebevegelser** *Sveiping med fire eller fem fingre* og **Hjørnehandlinger** *Tillat sveiping fra hjørnet med en finger*.

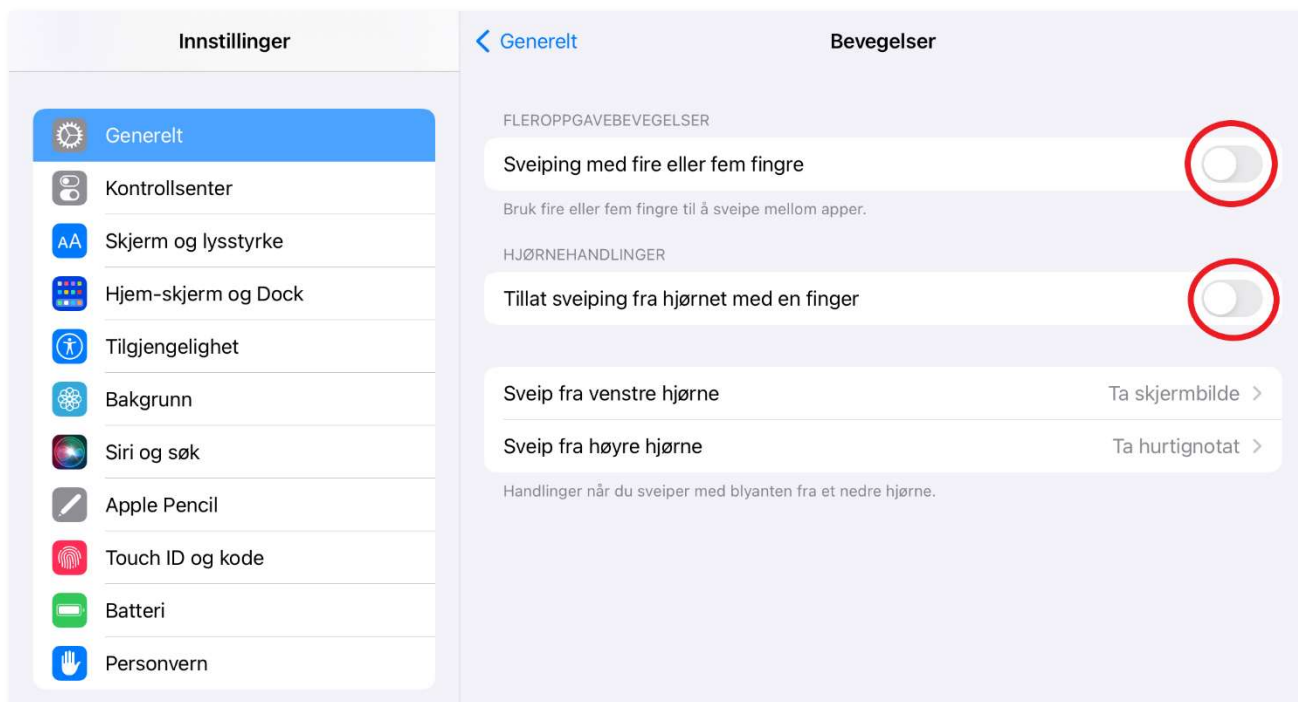

Innstillinger for språk- og områdeformat

Q-interactive bruker innstillingene for språk- og områdeformat som er angitt på iPadene for å vise tekst, datoer og andre verdier i riktig format for ditt land.

Trinn 1: Gå til **Innstillinger** → **Generelt** → **Språk og området**.

Trinn 2: Endre iPad-språk og område hvis det er nødvendig.




Innstilling for Ikke forstyrr

Sett begge iPadene i en Ikke forstyrr-modus for å eliminere distraksjoner som kan forstyrre testsituasjonen.

Trinn 1: Gå til **Innstillinger** → **Fokus** → **Ikke forstyrr**.

Trinn 2: Slå på **Ikke forstyrr**.

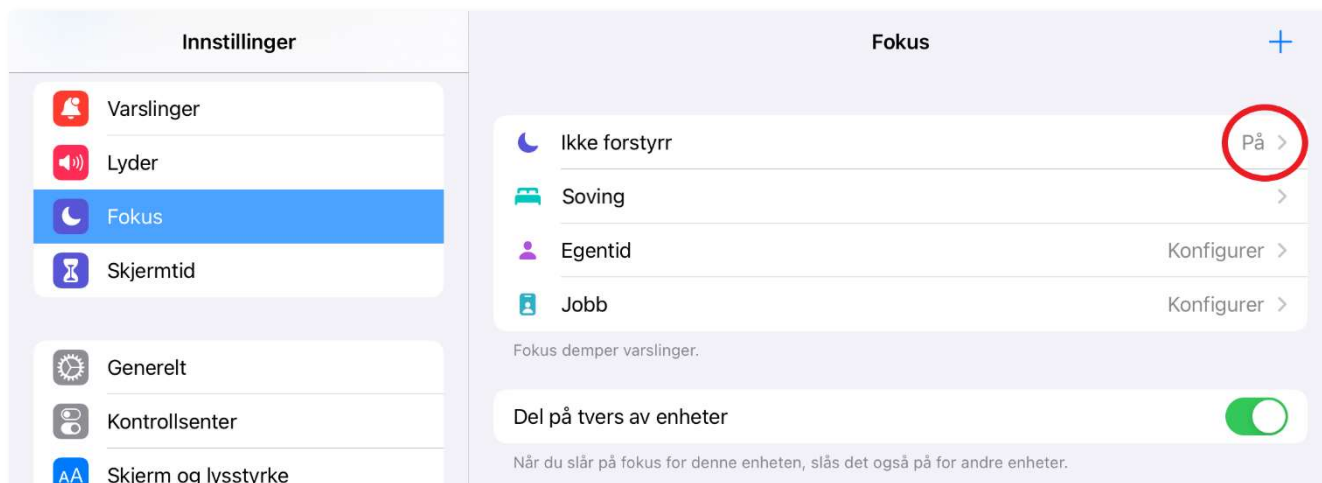


Installering av Assess-appen for Q-interactive

Q-interactive Assess er en app du kan laste ned i Apple App Store på iPaden. Før du konfigurerer innstillingene i Assess, **må** du installere Q-interactive Assess på **begge enhetene**. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned Assess-appen via en iPad og App Store.

Trinn 1: Gå til Hjem-skjermen og trykk på **App Store**-ikonet.



Trinn 2: Gå til søkefeltet på begge iPadene og skriv "**q-interactive**". Da vil appen Q-interactive Assess komme opp som et forslag.

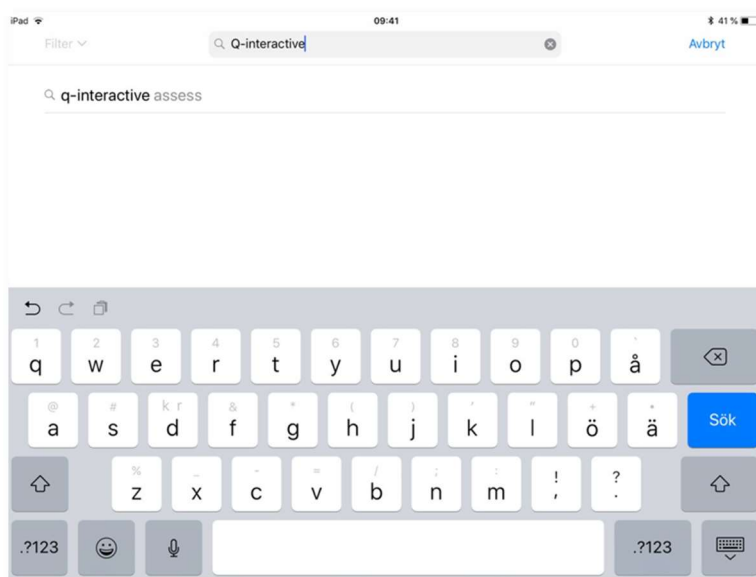


Trinn 3: Trykk på **HENT** og deretter **Installer**.



Obs for iCloud-brukere! Q-interactive lagrer data i en fil som iCloud automatisk blokkerer av hensyn til datasikkerhet.

Konfigurering av innstillinger for Assess-appen

Q-interactive krever at man bruker to iPader. En av iPadene skal brukes av testlederen og være i **Testleder**-modus, og den andre av testpersonen og være i **Testperson**-modus. I tillegg til å velge riktig programmodus på hver iPad, er det også viktig å tilpasse andre innstillinger for Assess-appen (se skjermbildet under og beskrivelser på neste side).

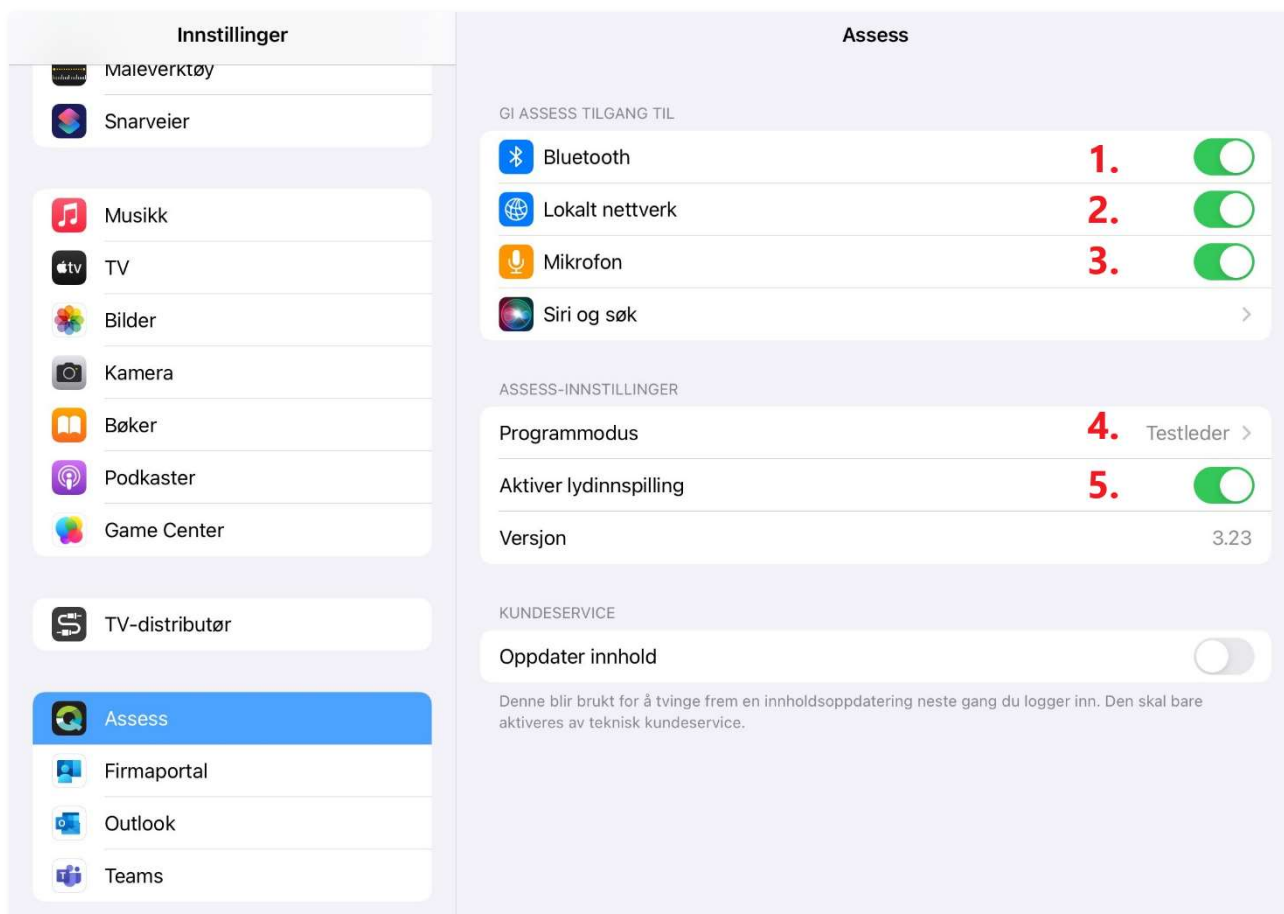

Gå til **Innstillinger > Assess**.

Trinn 1: Sørg for at **Assess har tilgang til Bluetooth**.

Obs! Hvis du nettopp har installert Assess og ser ikke Bluetooth-alternativet via **Innstillinger > Assess**, vil du først måtte logge deg på Assess og tillate appen til å ha tilgang til Bluetooth etter at systemet har bedt deg om det via en melding som kommer opp på skjermen.

Trinn 2: Sørg for at **Assess har tilgang til Lokalt nettverk**.

Trinn 4: Sørg for at **Assess har tilgang til Mikrofon**.

Obs! Hvis du nettopp har installert Assess og ser ikke Mikrofon-alternativet via **Innstillinger > Assess**, vil du først måtte logge deg på Assess og tillate appen til å ha tilgang til Mikrofon etter at systemet har bedt deg om det via en melding som kommer opp på skjermen. Meldingen vises enten etter første pålogging eller etter at du har begynt å administrere en av de verbale deltestene som er tilgjengelige på Q-interactive. For å få meldingen på skjermen må du også aktivere lydopptaket (se Trinn 5 under).

Trinn 4: Sett den ene iPaden i programmodus for **Testleder** og den andre i programmodus for **Testperson**.

For brukere av iPad Mini: Hvis du bruker iPad Mini, kan den *kun* brukes som Testleder og *ikke* Testperson.

Trinn 5: Aktiver lydinnspilling

I deltester der testpersonen gir verbale svar, vil Q-interactive ta opp svarene via iPaden. Hvis du ønsker å skåre en oppgave eller deltest etter administrering, kan du lytte til opptaket så lenge den aktuelle testen er tilgjengelig på iPaden. Når du sletter testen i Assess, slettes alle lydopptak som finnes for denne testen automatisk fra Assess.

Obs! Det kan hende at testpersonen ikke vil samtykke til lydopptaket. Du kan da deaktivere lydopptak via **Innstillinger > Assess > Slå av Aktiverer lydinnspilling**

Tips

- Forsikre deg om at iPadene er **fullt oppladet** før du starter å administrere en test.
- **Følg med på batterinivået** på begge iPadene under testadministreringen og ha strømledninger klare hvis noen av dem trenger å lades.
- Slå på **Ikke forstyrr** under Innstillinger > Fokus, og slå av varsler for FaceTime og Meldinger før du starter administreringen.
- Du *bør ikke* kjøre andre applikasjoner på iPaden når du administrerer en test. **Skru av alle apper** som kjører i bakgrunnen.
- Alltid oppbevar iPadene på et **trygt sted**.
- Bruk **Finn min iPad** på begge enhetene. Da kan du slette Assess (og alle data som finnes på appen) hvis iPaden blir stjålet eller du hvis mister den.
- **Start iPadene på nytt** mellom hver testadministrering for å sikre optimal ytelse.